

To make your
workflow excellent.



L'efficacité redéfinie

Utilisez tout le potentiel de l'automatisation de laboratoire.



Automatisation de laboratoire

« Conçu et produit en Allemagne :
qualité optimale en matière d'automatisation de
laboratoire depuis près de 30 ans. »



Rapidité de mise en œuvre. Facile à adapter. Construit pour durer.

Nos solutions autonomes et modulaires garantissent une flexibilité maximale – adaptée précisément à vos besoins – et vous aident, vous et vos employés, à consacrer plus de temps au travail de recherche qualitatif ! Notre expertise garantit l'excellence de votre flux de travail en pré-analyse et post-analyse.

Nos standards élevés sont notre engagement :
nous transformons votre flux de travail en un modèle d'excellence.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Des résultats plus rapides, de meilleurs soins**
Des délais d'exécution rapides facilitent des décisions cliniques éclairées et améliorent les résultats pour les patients.
- **Des résultats plus rapides, de meilleurs soins**
Des délais d'exécution rapides facilitent des décisions cliniques éclairées et améliorent les résultats pour les patients.
- **Allègement pour votre équipe**
Moins de tâches manuelles, plus de flexibilité, même en période de sous-effectif.
- **Mise en œuvre de projets réactive et fiable**
Mise en œuvre rapide de vos projets, de la planification à la mise en service.

Intégration transparente - avec n'importe quelle configuration de laboratoire ou fournisseur d'automatisation totale des laboratoires (TLA)

Investir dans l'amélioration durable des processus mérite d'être envisagé, notamment face à la concurrence croissante et à la nécessité de maîtriser les coûts. Indépendants des fournisseurs d'automatisation totale des laboratoires (TLA), nos systèmes restent entièrement compatibles avec les fournisseurs connus, ce qui vous offre une flexibilité maximale.

Nos solutions modulaires et autonomes couvrent un large éventail de processus pré et post-analytiques et peuvent être intégrées en toute transparence dans les flux de travail existants.

Nous concevons avec vous des solutions personnalisées que nous mettons en œuvre directement sur place. Rapide. Fiable. Adapté à vos besoins.

Les solutions de SARSTEDT restent pleinement opérationnelles, même si vous décidez de passer à un autre fournisseur de TLA à l'avenir. Grâce à leur conception modulaire et adaptable, nos systèmes s'intègrent en toute transparence et garantissent une compatibilité durable.



Indépendants mais compatibles

Nous sommes indépendants des fournisseurs d'automatisation totale des laboratoires (TLA), tout en étant parfaitement compatibles avec les solutions des fournisseurs les plus connus. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale.

Avec vous, nous planifions des projets individuels, construisons des solutions sur mesure et les installons immédiatement sur votre site.

Vos principaux avantages clés :

Indépendants et compatibles

- Fonctionne avec tous les principaux systèmes TLA
- Flexibilité pour changer de DIV sans remplacer l'automatisation préanalytique

Systèmes compacts et modulaires

- Conception, configuration et mise en service rapides
- Facilité d'extension ou d'adaptation au fil du temps



Expertise en ingénierie

Pour la précision, la fiabilité et la fluidité des flux de travail en laboratoire.


Depuis plus de 30 ans, SARSTEDT est un partenaire compétent et fiable dans le domaine de l'automatisation des laboratoires, fournissant des solutions fiables adaptées aux besoins évolutifs des laboratoires cliniques, des établissements de recherche et des centres de diagnostic dans le monde entier.

En mettant l'accent sur la précision, l'efficacité et la convivialité, les systèmes d'automatisation de SARSTEDT rationalisent les flux de travail de routine, réduisent les erreurs humaines et garantissent un traitement fiable et à haut débit des échantillons.

Les clients bénéficient de systèmes modulaires et personnalisables qui s'intègrent parfaitement dans les environnements de laboratoire existants, ainsi que de conseils d'experts, de formation et d'un support technique réactif. Notre engagement en faveur de la qualité, de l'amélioration continue et de la satisfaction de nos clients a consolidé notre réputation dans le domaine de l'automatisation de laboratoire.

De la qualité et l'acheminement des échantillons au tri et à l'archivage automatisés, SARSTEDT est synonyme de performance, de fiabilité et de partenariat sur lesquels vous pouvez compter – aujourd'hui et demain.

Des solutions pour chaque étape du processus, conçues pour s'adapter à votre laboratoire

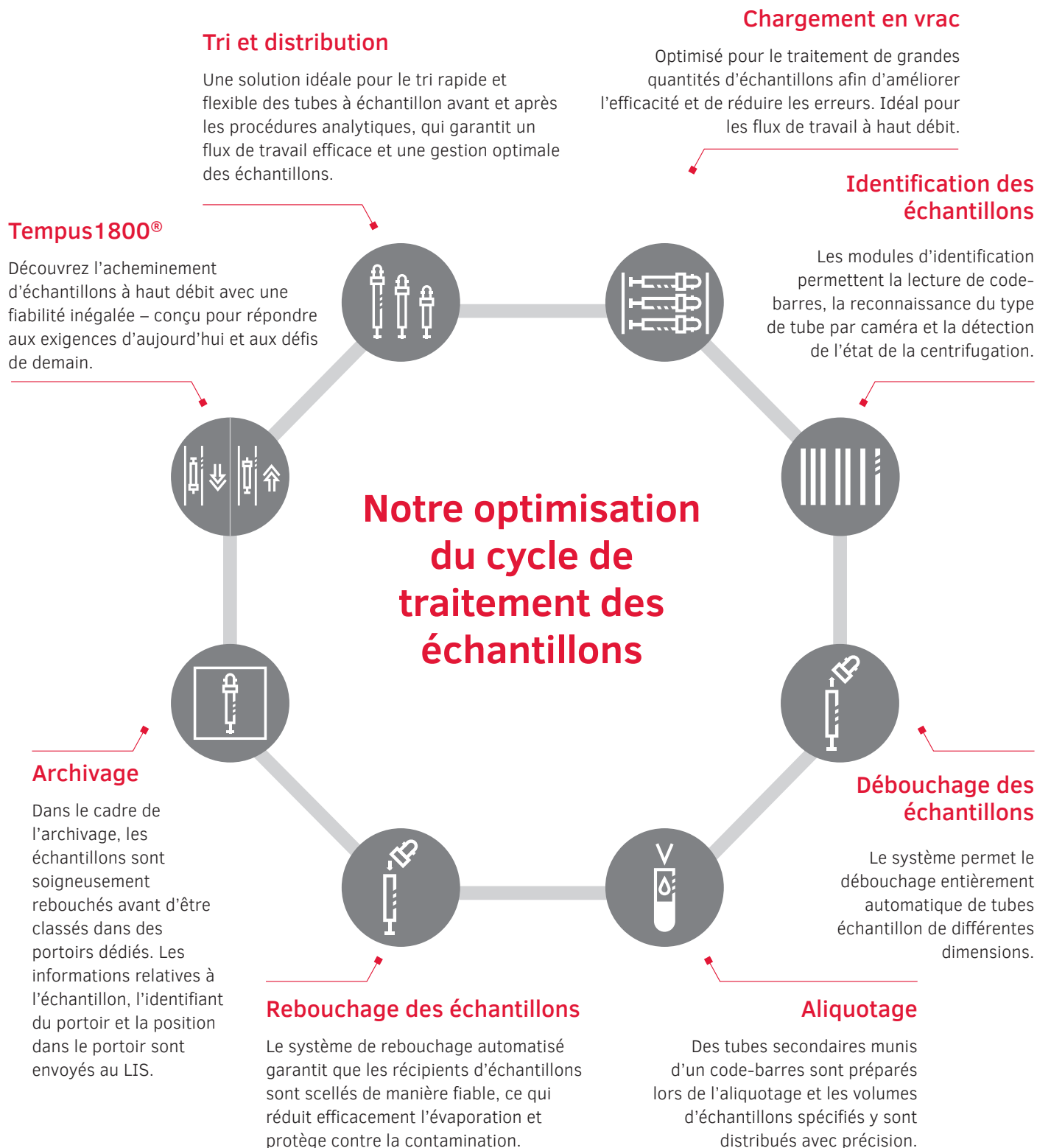



Débouchage

Déboucheur DC 1200 – pour l'ouverture automatique

Ouverture rapide et efficace des capes à vis et des bouchons, quel que soit le fabricant.

Le DC 1200 offre un débouchage entièrement automatisé pour tous les diamètres de tubes courants de 11 à 16 mm, en traitant facilement différents types de tubes en fonctionnement mixte. Le débouchage s'effectue directement dans le portoir d'analyse, ce qui élimine le besoin de rechargement et permet de gagner un temps précieux.

Avec un débit allant jusqu'à 1 200 tubes par heure, un fonctionnement intuitif et une compatibilité avec de nombreux portoirs linéaires existants, le DC 1200 garantit une efficacité maximale, réduit la charge de travail manuel et diminue le risque de contamination ou d'infection au cours des processus de laboratoire de routine.



Efficacité maximale

Ouvre jusqu'à 1 200 tubes par heure directement dans le portoir d'analyse – pas de rechargement, pas de retard.

Large compatibilité

Permet de traiter différents types de tubes (11 à 16 mm) en fonctionnement mixte et de prendre en charge de nombreux portoirs linéaires existants.

Sécurité et facilité d'utilisation accrues

Minimise le risque d'infection, réduit la charge de travail du personnel et garantit un fonctionnement simple et intuitif.



Fiche
technique
DC 1200

[sarstedt.com/
la-dc1200-fr](http://sarstedt.com/la-dc1200-fr)



Vos avantages :

- Le déboucheur DC 1200 est compatible avec différents types de portoirs et de bouchons, et peut être utilisé avec de nombreuses plateformes analytiques et de nombreux tubes échantillon
- Grâce à son format compact, il libère un précieux espace dans le laboratoire pour d'autres équipements ou activités. Il s'intègre dans les concepts de laboratoire existants
- Réduit les microtraumatismes répétés (MR) en prenant en charge de manière fiable les tâches monotones et répétitives, soulageant ainsi votre personnel.



Rebouchage

Reboucheur RC 1200 – pour un rebouchage fiable

Rebouchez et fermez les tubes pour l'acheminement et l'archivage.

Le module de rebouchage Recapper (RC) assure une fermeture sûre et étanche à l'évaporation des tubes échantillon, améliorant ainsi l'intégrité et la sécurité des échantillons tout au long du flux de travail. Disponible en trois versions, il est compatible avec les bouchons universels

(13 à 16 mm) et les capes à vis pour tubes SARSTEDT (13 à 15 mm), ce qui le rend idéal pour l'acheminement fiable des échantillons, l'archivage à long terme et l'amélioration de l'efficacité des processus dans le laboratoire.



Amélioration de la sécurité des échantillons


Le rebouchage automatisé réduit l'évaporation et évite la contamination, garantissant l'intégrité de l'échantillon.

Compatibilité universelle

Une seule cape d'archivage convient à tous les tubes de 13, 15 et 16 mm de diamètre – plus besoin de plusieurs types de capes.


Flux de travail efficaces

L'automatisation complète du débouchage et du rebouchage rationalise le retraitement, ce qui permet de gagner un temps précieux en laboratoire.

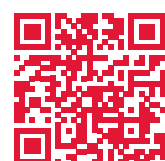

Fiche
technique
RC 1200

[sarstedt.com/
la-rc1200-fr](http://sarstedt.com/la-rc1200-fr)

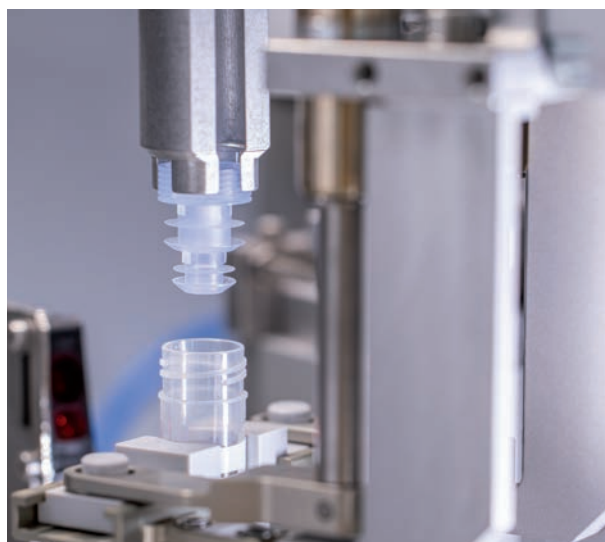

Vos avantages :

- Le bouchon peut être inséré et retiré automatiquement à l'aide du dispositif RC 1200
- Minimise l'évaporation des échantillons pendant le stockage grâce à des bouchons d'archivage adaptés à des tubes de 13 à 16 mm de diamètre ou des bouchons à vis pour les tubes SARSTEDT de 13 ou 15 mm.
- Solution idéale pour l'archivage à long terme et l'expédition sécurisée d'échantillons grâce aux capes à vis en option.
- Réduit les microtraumatismes répétés (MR) en prenant en charge de manière fiable les tâches monotones et répétitives, soulageant ainsi votre personnel.



Identification



Débouchage



Rebouchage



Tri



Tempus1800®

Envoi

Trieur FLEX 900 :

la solution compacte

Combine les phases pré et post-analytiques dans un seul appareil autonome.

Le FLEX 900 combine les phases pré et post-analytiques en un seul système compact, garantissant une grande efficacité et une utilisation optimale de l'espace du laboratoire. Il élimine les tâches manuelles répétitives telles que le retrait des bouchons, réduisant ainsi le risque de blessures pour le personnel. Les tubes de différentes tailles (65 à 100 mm de longueur, 11 à 16 mm de diamètre) sont traités sans tri

préalable, avec une élimination sûre et hygiénique des bouchons. Le système est compatible avec la plupart des portoirs et des supports et dispose d'un logiciel personnalisable pour une intégration flexible. Il peut être configuré en tant que déboucheur, reboucheur ou les deux, et avec la possibilité d'une mise à jour si nécessaire.





Acheminement flexible des échantillons

Avec le module optionnel Tempus1800® Fero, les échantillons peuvent être automatiquement acheminés vers différentes zones du laboratoire – aucun transport manuel n'est nécessaire.



Débouchage et rebouchage automatiques

Réduisez les manipulations grâce au débouchage et au rebouchage automatiques et sélectifs, pour améliorer la sécurité des échantillons et réduire le risque de contamination.



Fiche technique
DC RC 900 Flex

[sarstedt.com/
la-dcrc900flex-fr](http://sarstedt.com/la-dcrc900flex-fr)



Vos avantages :


- Le FLEX 900 est l'appareil le plus compact du marché qui offre simultanément les fonctions d'identification, de débouchage, de rebouchage, de tri et de distribution des échantillons via le Tempus1800®. Toutes les fonctions peuvent être utilisées en combinaison sur une surface d'environ 1 m²
- Optimisation de l'espace : La conception compacte permet de libérer un précieux espace dans le laboratoire pour d'autres appareils ou activités. S'intègre dans les concepts de laboratoire existants
- Le débit élevé d'échantillons (jusqu'à 700 tubes par heure) réduit les délais d'exécution, les résultats d'analyse sont donc disponibles plus rapidement et les patients peuvent être soignés plus vite
- L'appareil est compatible avec plus de 70 types de portoirs, ce qui permet de l'utiliser avec un grand nombre de plateformes d'analyse différentes.



Chargement
en vrac



Identification

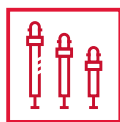

Tri




Tempus1800®
Réception

BL 3500 – augmenter l'efficacité de votre laboratoire

Notre nouveau chargeur en vrac permet de trier les échantillons de manière efficace et sans erreur, plus rapidement que jamais.

Le temps est un facteur clé dans la routine quotidienne du laboratoire. Avec le nouveau BL 3500, les équipes de laboratoire disposent d'un membre fiable à leurs côtés pour assurer un soutien efficace et sans erreur pour le tri des échantillons – plus rapidement que jamais. Le chargement en vrac avec le BL 3500 améliore l'efficacité et accélère l'analyse. Les diagnostics sont plus rapides et la prise en

charge des patients est améliorée. Sa conception compacte permet de libérer de l'espace et s'intègre parfaitement dans les flux de travail existants. En parallèle, il réduit les tâches manuelles, allège la charge de travail du personnel et garantit un fonctionnement intuitif et sans erreur, créant ainsi un environnement de travail plus ergonomique et plus productif et garantissant un gain de temps.

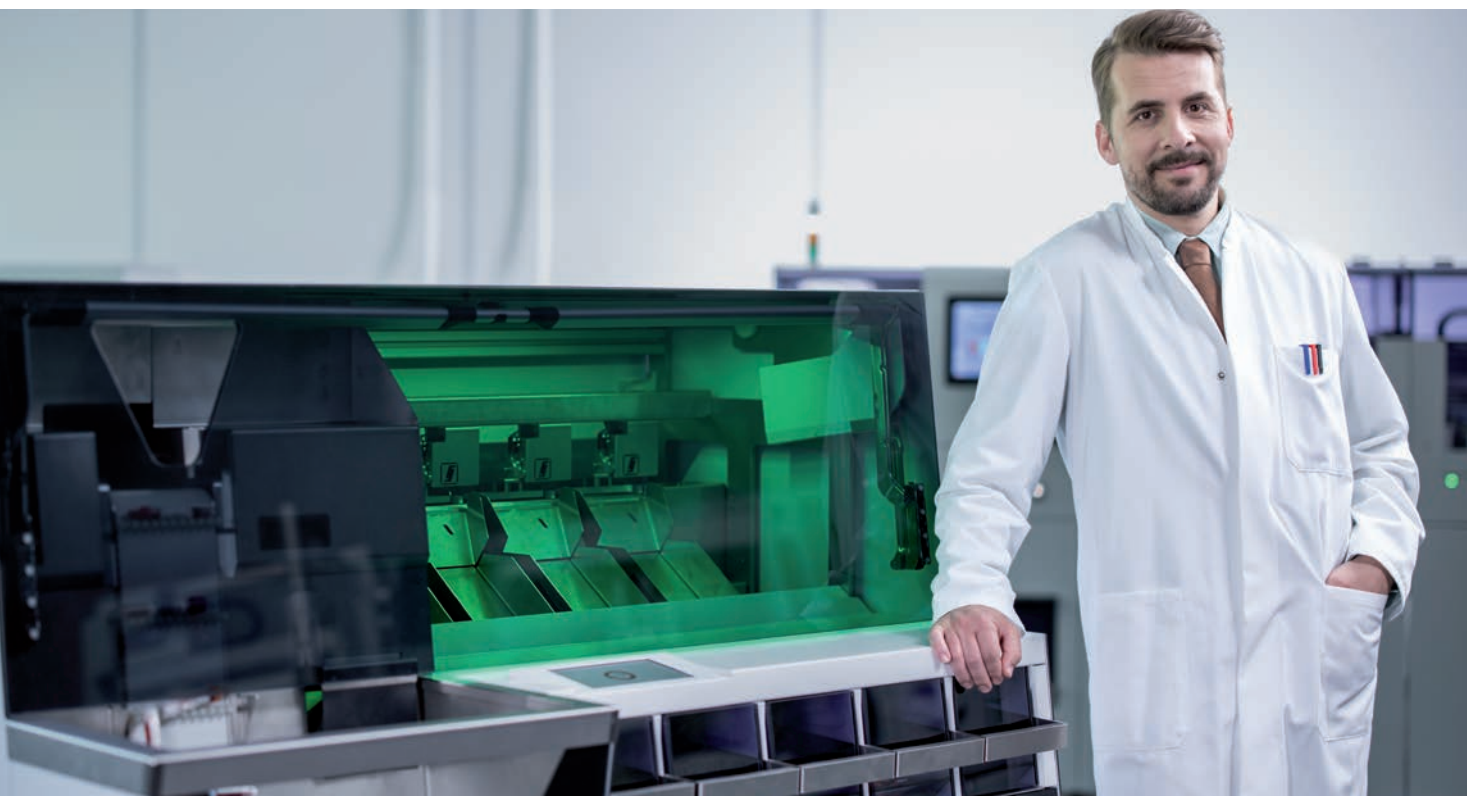

Construction compacte et conception ergonomique

Grâce à ses dimensions compactes de 1 385 × 905 × 1 455 mm, le BL 3500 s'intègre parfaitement dans les petits laboratoires. Le BL 3500 allie la complexité technique à un design optimisé et peu encombrant.

Débit d'échantillons de 3 500 tubes/h

La rapidité et la fiabilité sont des facteurs essentiels dans le tri des échantillons. Le BL 3500 y établit de nouvelles normes.

Avec un débit d'échantillons allant jusqu'à 3 500 tubes par heure, le BL 3500 est l'un des chargeurs en vrac les plus rapides du marché et fait donc partie de l'équipement de base de tout laboratoire moderne, qu'il soit grand ou petit.

Fonction de boucle intelligente

Un échantillon n'est pas clairement identifiable ou la commande de test n'est pas encore active dans le LIS ? Ce n'est pas un problème grâce à la fonction de boucle intelligente. Le retour de l'échantillon permet de l'attribuer clairement lors d'un nouveau passage. Si cela n'est pas possible non plus, l'échantillon est éjecté dans un récipient séparé – de manière simple et facile.



Fiche
technique
BL 3500

[sarstedt.com/
la-bl3500-fr](http://sarstedt.com/la-bl3500-fr)


Acheminement et tri rapides des échantillons



Réduisez le temps de traitement des échantillons (TAT) en introduisant les échantillons directement dans le BL 3500 à l'aide du système d'acheminement d'échantillons Tempus1800®.

Toutes les caractéristiques en un coup d'œil : tempus1800.sarstedt.com



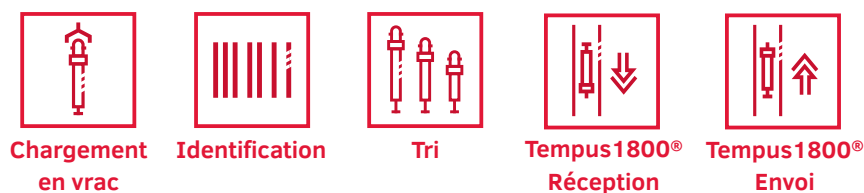

Trieur en vrac BL 1200 – intelligent, rapide, flexible

Le BL 1200 permet un tri efficace des tubes avec un minimum d'effort et une intégration fluide dans tout flux de travail de laboratoire.

Le chargeur en vrac BL 1200 optimise la manipulation des échantillons en permettant leur chargement dans une goulotte, ce qui élimine un tri préalable ou une insertion manuelle. Il est doté d'un module d'identification intégré pour l'identification de l'échantillon et la vérification de l'état

de la centrifugation (Gel-Check), pour un traitement précis et fiable de l'échantillon. Ce système améliore le débit, réduit les erreurs manuelles et contribue à rationaliser les flux de travail des laboratoires, pour gagner du temps et améliorer l'efficacité opérationnelle.



Gestion optimale de l'espace

Grâce à sa conception compacte, le BL 1200 s'intègre facilement et permet de réduire l'encombrement dans le laboratoire sans compromettre les performances ou les fonctionnalités.



La rapidité au service de la performance

Avec des taux de traitement allant jusqu'à 1 200 tubes par heure, le BL 1200 raccourcit les délais d'exécution et permet d'accélérer le diagnostic des patients.

Adaptable à votre flux de travail

Avec plus de 70 types de portoirs compatibles et des critères de tri configurables, le BL 1200 s'adapte de manière flexible aux exigences changeantes des laboratoires.



Fiche
technique
BL 1200

[sarstedt.com/
la-bl1200-fr](http://sarstedt.com/la-bl1200-fr)



Utilisation polyvalente et débit élevé

- Convient aux tubes échantillon de divers fabricants, d'une longueur de 80 à 110 mm (avec cape) et d'un diamètre de 11 à 16 mm
- Prend en charge une large gamme de matières telles que le sérum, le plasma, le sang total, l'urine, etc.
- Idéal pour diverses exigences de laboratoire et divers types d'échantillons
- Recevez ou envoyez des échantillons via le système d'acheminement de tubes Tempus1800®.



Chargement
en vrac



Identification



Tri



Connection à la
ligne d'analyse



Tempus1800®
Réception



Tempus1800®
Envoi

BL 1200 Sort Connect – pour les grands volumes d'échantillons

Optimisez votre flux de travail et traitez les volumes les plus importants grâce à une gestion rapide et intelligente des échantillons.

Le BL 1200 Sort Connect est conçu pour aider les laboratoires à gérer de grands volumes d'échantillons avec une intervention manuelle minimale. Le système permet de trier automatiquement jusqu'à 1 200 tubes par heure et est compatible avec une large gamme de portoirs courants. En automatisant les étapes clés du flux de travail pré-analytique, il contribue à rendre la structure de processus constante et

fiable. L'intégration dans les lignes de laboratoire est possible par transfert direct de portoir ou par connection optionnelle au système d'acheminement Tempus1800®. Jusqu'à trois unités d'envoi peuvent être intégrées pour distribuer les échantillons à différentes stations de laboratoire sans manipulation.



Équilibrage des portoirs

Équilibrage automatique des portoirs de centrifugation à l'aide d'échantillons factices.

Tempus1800® distribution d'échantillons

Jusqu'à trois modules Tempus1800® Fero permettent d'acheminer les échantillons vers plusieurs stations de laboratoire sans effort manuel.



Gel-Check

Vérification de l'état de la centrifugation pour les tubes de gel, garantissant un traitement précis et fiable des échantillons.

Chargement flexible des échantillons

Permet de charger les échantillons en vrac et dans le module de connexion Tempus1800® en même temps.



Fiche
technique
BL 1200

[sarstedt.com/
la-bl1200-fr](http://sarstedt.com/la-bl1200-fr)



Module Sort Connect (SC) – le complément idéal

Pour connecter à plusieurs lignes d'analyse :

- Connection direct entre le HSS et le système de rails d'analyse pour une automatisation sans faille
- Transfert efficace de tubes individuels ou de portoirs dans l'entrée des rails de l'analyseur
- Intégration du flux de travail en faisant du HSS une partie du système global
- Configuration modulaire avec le module SC comme dernier maillon de l'analyse.



Chargement
vrac et portoir



Identification



Débouchage



Aliquotage



Rebouchage



Tri



Tempus1800®
Réception



Tempus1800®
Envoi


Trieur à haute vitesse HSS – un gain de temps précieux

Le trieur à haute vitesse SARSTEDT automatise vos phases pré et post-analytiques.

Le HSS (trieur à haute vitesse) est une solution d'automatisation modulaire conçue pour répondre aux exigences de votre laboratoire. Avec des vitesses de tri élevées (jusqu'à 1 200 tubes/heure), l'aliquotage, le débouchage et le rebouchage automatisés, ainsi que l'intégration du système LIS, le HSS augmente l'efficacité, réduit les délais d'exécution et garantit une qualité d'échantillon constante.

Son fonctionnement convivial, son entretien réduit et sa compatibilité avec plus de 70 types de portoirs et tous les tubes échantillon courants en font un instrument très adaptable. Des fonctionnalités intelligentes telles que la priorisation STAT, des règles de tri flexibles et des fonctions de retour en vrac optimisent les processus pré-analytiques tout en réduisant les tâches manuelles.



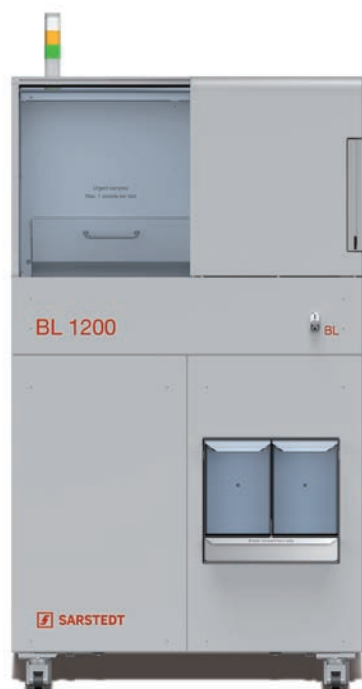

Module de chargeur en vrac (BL)

Les tubes échantillon fermés sont chargés manuellement dans des portoirs ou automatiquement dans des goulottes (Tempus1800®) sans tri préalable ni insertion. Le chargeur en vrac dispose d'un module d'identification intégré pour identifier les échantillons et déterminer leur état de centrifugation (Gel-Check). Le chargement automatique des échantillons dans la goulotte a également été intégré.



Module d'entrée/sortie (IO)

Le module IO permet l'insertion et l'éjection des tubes échantillon, qu'ils soient ouverts ou fermés. L'agencement de la plateforme est personnalisé pour chaque laboratoire et peut être ajusté à l'aide de plaques d'adaptation (SARSTEDT FlexPlates) pour passer des opérations de routine aux opérations d'archivage. En option, il est possible d'intégrer jusqu'à deux unités Tempus1800® et d'acheminer automatiquement des tubes vers différentes zones du laboratoire.



Module d'identification (ID)

Le module ID identifie les tubes échantillon à partir du code-barres, détermine le type de tube (couleur, forme et géométrie du bouchon) et établit le statut de centrifugation (Gel-Check).






Module de débouchage (DC)

Le déboucheur enlève les capes à vis et les bouchons de différents fabricants – pas de tri préalable et pas de contamination croisée.



Module d'aliquotage (AQ)

Le module AQ automatise l'aliquotage, étiquette les tubes secondaires et assure un pipetage de haute précision sans contamination.

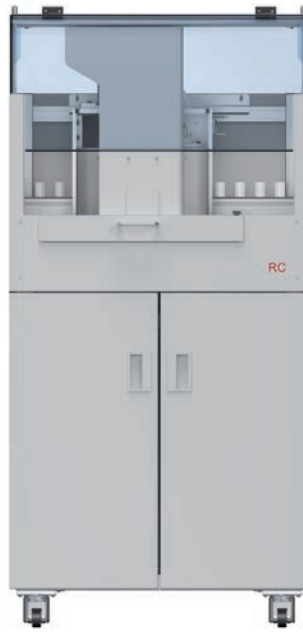

Module de rebouchage (RC)

Le reboucheur est disponible en 3 versions. Il ferme les tubes échantillon d'un diamètre de 13 à 16 mm à l'aide d'un bouchon universel, empêchant ainsi l'évaporation. Les tubes SARSTEDT d'un diamètre de 13 à 15 mm sont également fermés à l'aide d'un bouchon à vis approprié pour l'acheminement l'archivage à long terme.



Module d'entrée/sortie (IO) avec le Tempus1800® Fero

Le Tempus1800® Fero accélère l'acheminement des échantillons entre les laboratoires et maximise le potentiel du système SARSTEDT HSS. Le système réduit le délai d'exécution total (ToTAT) des échantillons cliniques et permet une prise de décision plus rapide, ce qui améliore la prise en charge des patients.




Débit optimisé

Le système HSS rationalise le tri des échantillons, traite efficacement de grands volumes et augmente la productivité des laboratoires.

Flexibilité et évolutivité

Il s'adapte à différents types d'échantillons et peut être adapté pour répondre aux besoins évolutifs du laboratoire, garantissant ainsi une valeur à long terme.

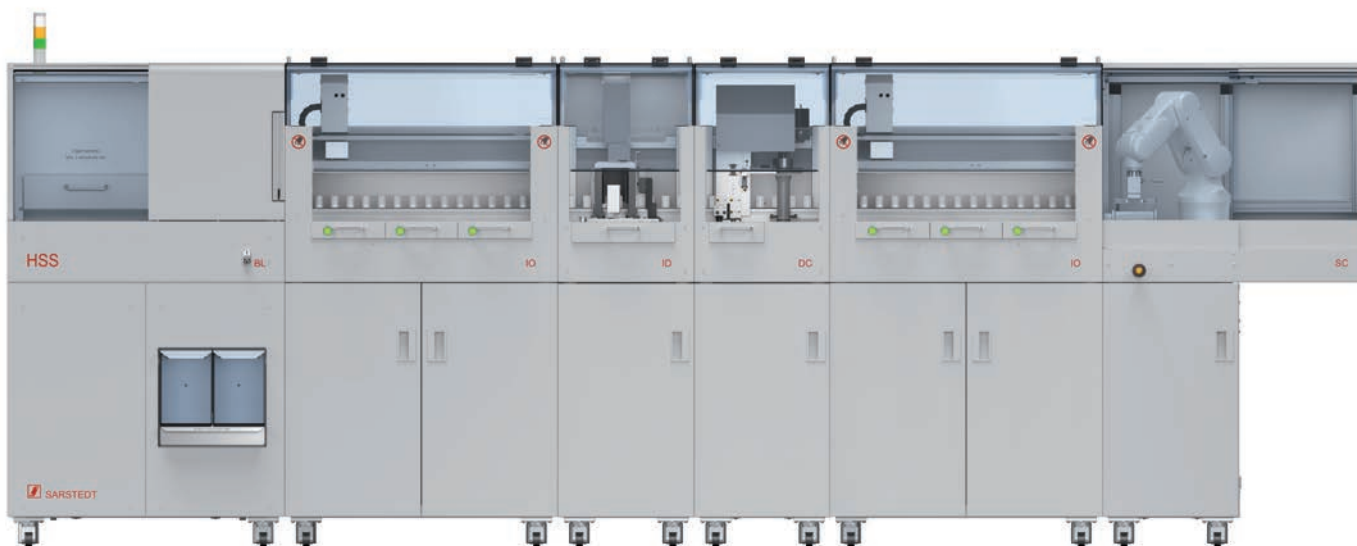


Précision et fiabilité accrues

Le tri automatisé réduit les erreurs humaines et permet d'obtenir des résultats constants et de haute qualité à chaque opération.


Flux de travail optimisé

Le système s'intègre parfaitement dans les installations de laboratoire existantes, améliorant l'efficacité globale du processus et réduisant le travail manuel.

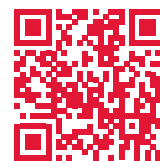

Fiches techniques
HSS

[sarstedt.com/
la-datasheet-fr](https://sarstedt.com/la-datasheet-fr)

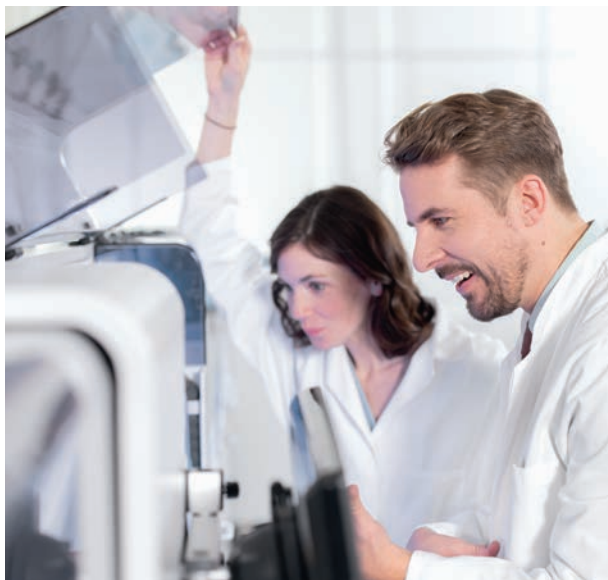

Configurez votre HSS !

- La conception modulaire permet une installation entièrement personnalisée, parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de votre environnement de laboratoire
- La fonctionnalité, le débit, l'encombrement et le coût peuvent tous être adaptés individuellement, même rétroactivement
- Discutons ensemble de votre configuration idéale !



EN SAVOIR PLUS

sarstedt.com/la-hss-fr



Des diagnostics plus rapides



Rentabilité




Entretien minimal



Acheminement innovant

Tempus1800®

Réception et envoi d'échantillons au sein du laboratoire, entièrement intégré à l'automatisation des laboratoires SARSTEDT

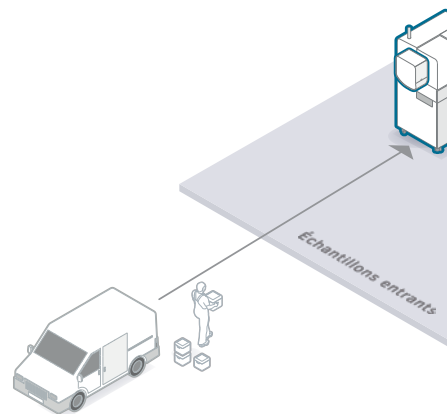

Le Tempus1800® est une technologie innovante qui transforme le transport de petits échantillons cliniques dans les établissements de santé et les laboratoires.

Lors de l'envoi des échantillons au sein du laboratoire avec les systèmes d'automatisation SARSTEDT BL1200, HSS, Flex 900 via le Tempus1800® Fero, le côté réception des échantillons reste ouvert : Le Tempus1800® permet un transfert transparent des échantillons vers toutes les

plateformes d'automatisation de laboratoire courantes. Cela garantit une flexibilité maximale pour l'intégration dans les systèmes existants ou futurs. Le système apporte une réponse précise et innovante aux défis logistiques auxquels sont confrontés les laboratoires cliniques, qu'ils soient indépendants ou hospitaliers. Il réduit le ToTAT, optimise l'utilisation des analyseurs de diagnostic et améliore l'efficacité opérationnelle. Manipulation automatisée des échantillons en un seul geste. En garantissant des résultats plus rapides et plus fiables, le Tempus1800® contribue directement à l'amélioration des résultats pour les patients.



Tempus1800® Fero

Le Tempus1800® Fero est un module unique qui n'est disponible qu'avec les instruments d'automatisation de laboratoire de SARSTEDT. Il permet l'envoi automatisé des échantillons après traitement et optimise la connectivité au sein de votre laboratoire tout en minimisant les interventions manuelles. Le Tempus1800® Fero augmente le débit et améliore le délai d'exécution, redéfinissant ainsi l'efficacité du laboratoire.




Tempus1800® Necto

Le Tempus1800® Necto est une solution automatisée qui offre un débit élevé pour la réception, la détection et le transport d'échantillons sur de longues distances. Il rationalise tout le processus d'enregistrement et de tri, ce qui permet de transférer les échantillons jusqu'à six emplacements différents avec une connexion directe aux plateaux de réception Tempus1800® ou aux systèmes d'automatisation des laboratoires.

Efficacité accrue

Automatise le chargement et le tri des échantillons, réduisant ainsi les manipulations et augmentant le débit.

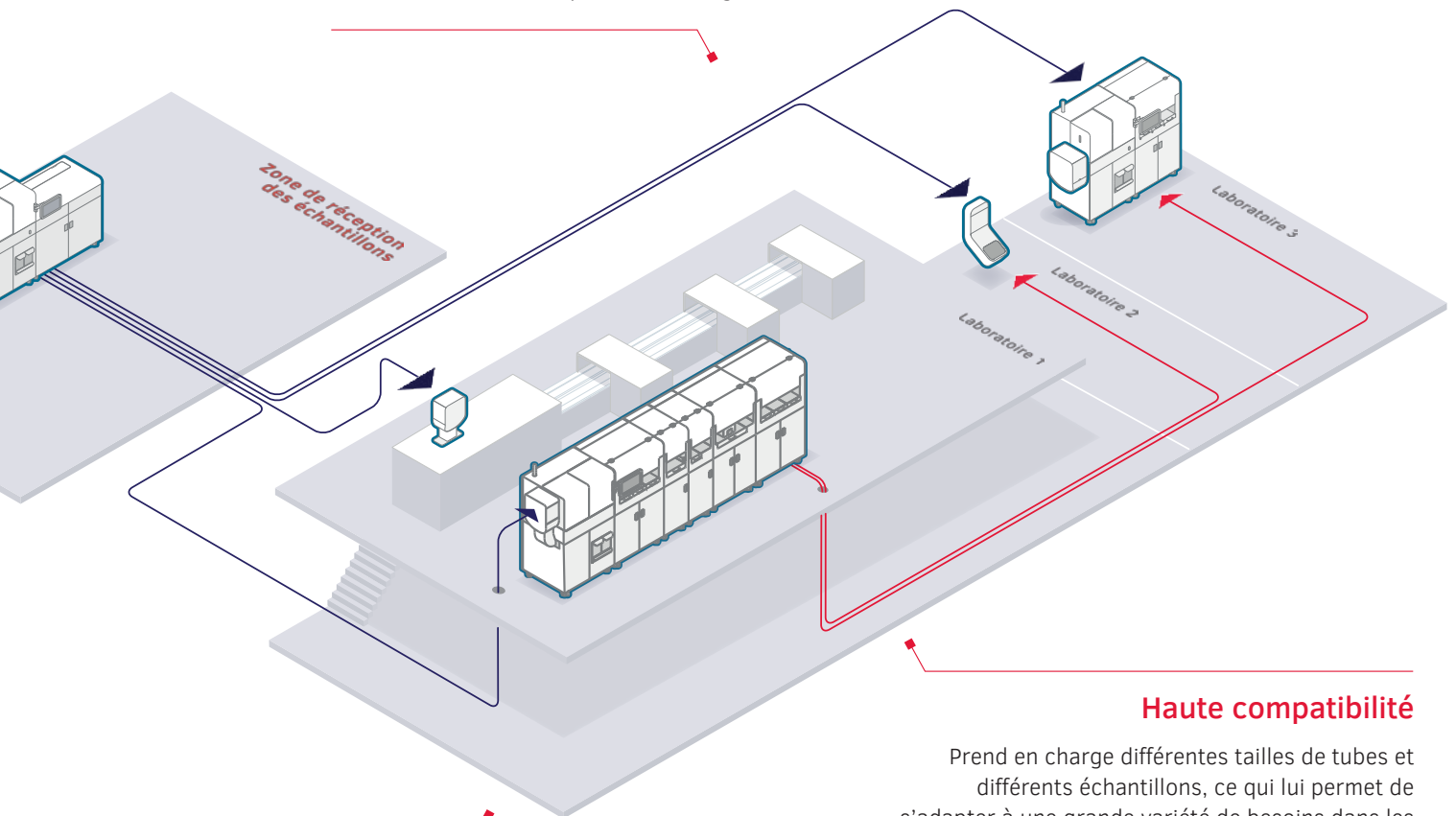

Amélioration de la précision

Le module d'identification intégré garantit une identification précise de l'échantillon et une vérification de son état, réduisant ainsi les erreurs.

Haute compatibilité

Prend en charge différentes tailles de tubes et différents échantillons, ce qui lui permet de s'adapter à une grande variété de besoins dans les laboratoires.



En savoir plus sur le Tempus1800®

sarstedt.com/la-tempus1800-fr



Conçu pour satisfaire aux exigences élevées du travail en laboratoire

- Hautes précision et performance pour répondre aux normes exigeantes des laboratoires modernes
- Intégration fluide dans les systèmes d'automatisation de laboratoire existants pour des flux de travail rationalisés
- Efficacité accrue grâce à une solution d'acheminement synchronisée et optimisée
- Faibles exigences en matière d'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et les interruptions d'activité
- La conception durable garantit une fiabilité à long terme et des performances constantes
- Permet d'obtenir des résultats rapides et précis, contribuant ainsi à l'amélioration de la prise en charge des patients.

Le système d'organisation des boîtes de Petri (POS)



Capacité et flexibilité élevées

Avec une capacité de 600 boîtes (15 chargeurs de 40 boîtes chacun), le système dispose d'une grande capacité et d'une grande flexibilité.

Conception compacte et ergonomique

Installation simplifiée dans des espaces variés grâce à son design compact.

Le POS 720 automatise l'étiquetage et le tri de 700 boîtes de Pétri par heure, garantissant une disponibilité fiable et une identification précise tout au long du flux de travail. Avec une capacité de 600 boîtes (15 chargeurs de 40), il offre un débit élevé et une flexibilité exceptionnelle. Des code-barres lisibles à la machine et un étiquetage clair réduisent les erreurs et améliorent la traçabilité.

L'interface intuitive et les faibles besoins d'entretien réduisent le temps de formation et simplifient l'utilisation quotidienne. L'impression de code-barres en option sur le côté ou le fond des boîtes permet une lecture microscopique et visuelle. Grâce à sa conception compacte, à sa compatibilité avec toutes les boîtes courantes et à sa capacité à traiter des supports rares via une imprimante d'étiquettes supplémentaire, le POS 720 rationalise les opérations des laboratoires de microbiologie, améliorant ainsi la qualité, l'efficacité et la compétitivité.



L'extension du système de transfert de boîtes de Petri (PTS)


Le système de transfert de boîtes de Petri (PTS) rationalise les flux de travail des laboratoires en acheminant de manière fiable les piles de boîtes de Petri du POS 720 vers les postes de travail désignés.

Sa conception autonome peut être adaptée à l'agencement de votre laboratoire, tandis que l'interface conviviale garantit un fonctionnement intuitif et une formation minimale.

Le système réduit les manipulations et assure une livraison rapide et fiable des piles de boîtes de Petri, en fonction de la séquence des échantillons sur le lieu de travail.

Vos avantages pour le flux de travail


- Système de transport rapide par boîte
- Personnalisable pour tout laboratoire
- Conception compacte et peu encombrante.

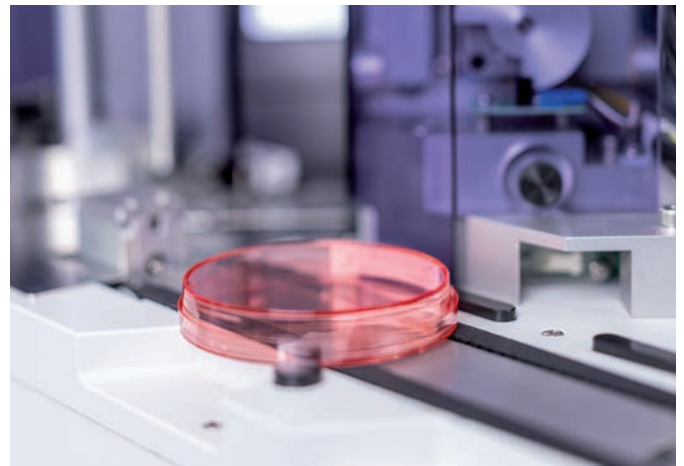

Le PTS assure l'acheminement des boîtes de Petri vers un maximum de 7 postes de travail.

Acheminement sécurisé et simple

Assure l'acheminement fiable des boîtes de Petri vers les différents postes de travail.

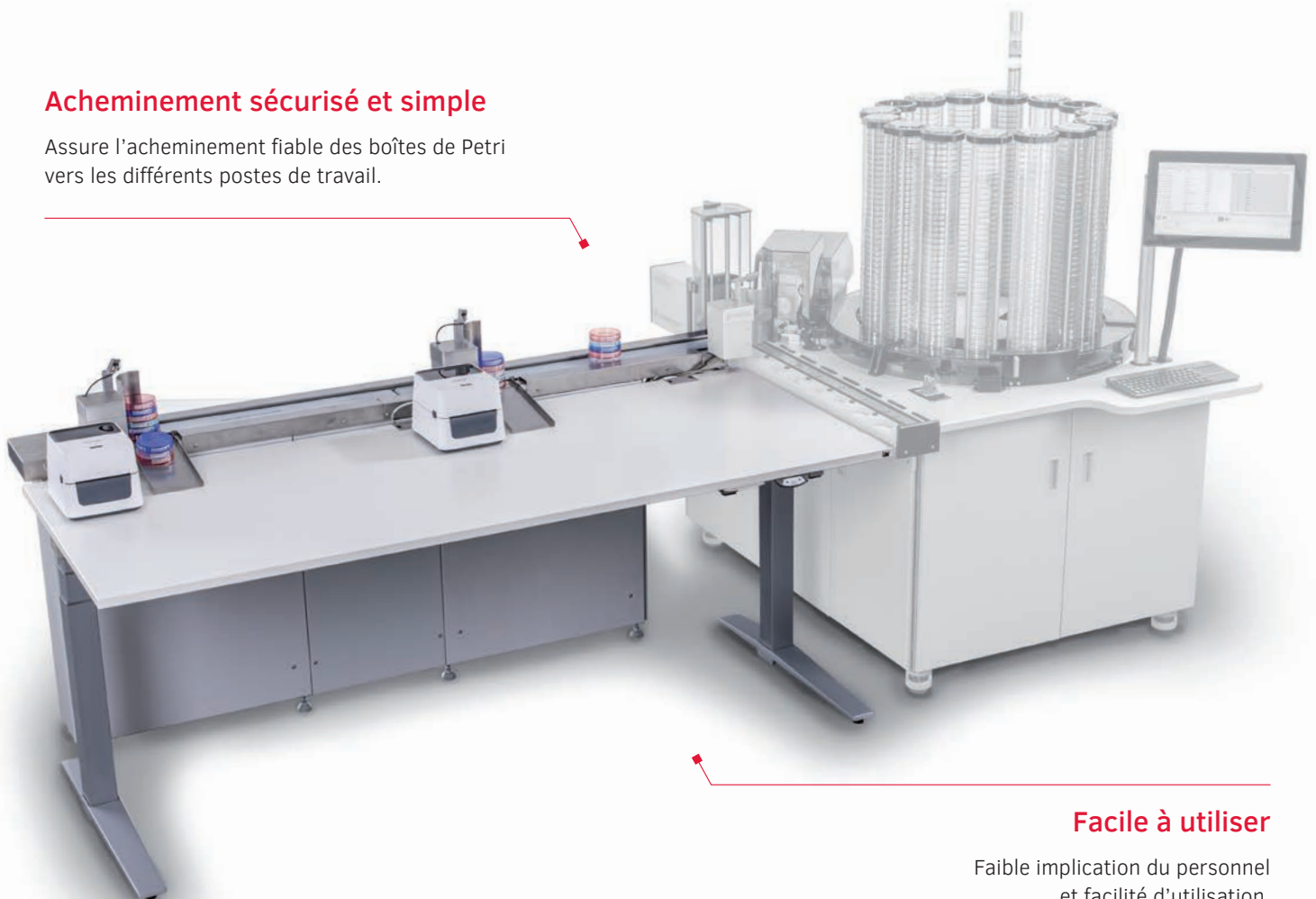

Facile à utiliser

Faible implication du personnel et facilité d'utilisation.

Si vous avez des questions,
nous serons ravis de vous aider !

Visitez notre site Web : www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Plus d'informations :
sarstedt.com